

Schnellstartanleitung **HYDRO 4 HEALTH 1800PRO**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf/zur Miete dieses Wasserstoffgeräts. Nachdem Sie alles ausgepackt haben, beginnen wir mit dem Anschluss des Nasenschlauchs. Zwischen den Schläuchen sehen Sie ein blaues Rohr. Dies ist der Wassersammler. Dieser muss gelegentlich geleert werden, um das Eindringen von Wassertropfen in die Nase zu verhindern. Dies geschieht, indem Sie die beiden Hälften drehen und auseinander ziehen. Dies wird erst nach einigen Betriebsstunden zum Problem.

Zuerst schließen wir das Netzkabel an. Ein Ende in die Maschine und das andere in die Steckdose. Schalten Sie nun die Maschine mit dem roten Netzschalter auf der Rückseite der Maschine ein. Die Maschine meldet, dass der Wasserstand zu niedrig ist: „Niedriger Wasserstand, Wasser hinzufügen“. Da er neu ist, wird er dies sofort anzeigen. Da der Wassertank noch komplett leer ist, füllen wir ihn bis 5 cm unterhalb der Einfüllöffnung (Flügelschraubverschluss oben) auf.

Ungefiltertes Leitungswasser darf in der Maschine nicht verwendet werden. Es darf ausschließlich demineralisiertes Wasser (erhältlich im Supermarkt und Baumarkt), selbst hergestelltes Umkehrosmosewasser oder destilliertes Wasser verwendet werden. Sobald der Tank mit Wasser gefüllt ist, schrauben Sie die Kappe wieder auf und das Gerät ist einsatzbereit. Über die mittlere Taste an der Vorderseite des Geräts unterhalb des Displays können Sie die Wasserstoffproduktion starten oder pausieren.

Mit der linken Taste können Sie die Uhrzeit bei Bedarf anpassen. Mit der rechten Taste lässt sich die Wasserstoffmenge pro Minute einstellen. Dieser sollte immer auf 1800 ml/min, die maximale Menge, eingestellt werden. Es kann auch mit 900 ml/min oder 450 ml/min (Milliliter pro Minute) betrieben werden. Wenn man weniger Wasserstoff verabreichen möchte, ist es meiner Meinung nach besser, es einfach bei 1800 zu belassen und die Behandlungszeit etwas zu verkürzen.

- Die normale Behandlungszeit beträgt 40-60 Minuten. pro Zeit. 3 bis 7 Mal pro Woche.

- Es ist keine Wartung erforderlich, aber wenn Sie das Gerät länger als 3 Wochen nicht verwenden, ist es besser, kein Wasser im Tank zu lassen. Anschließend legst du es am besten auf die Arbeitsplatte neben der Spüle und schraubst den Schraubverschluss auf der Rückseite ab (manchmal bleibt das Gummitteil dran, ziehe das dann auch ab). Dann sehen Sie, wie das Wasser herausläuft. Bitte warten Sie, bis es nach +-10 Minuten vollständig leer ist.

Optional: dieses Gerät funktioniert zusammen mit dem ATP-Armband von PHOTON 4 HEALTH. Den Anschluss erfolgt über den USB-Ausgang an der Seite der Maschine. Dieses Low-Level-Lasertherapie-Armband wird so getragen, dass die Lichter die Innenseite Ihres Handgelenks bestrahlen. Die speziellen Farblaser und Lichtpulsationen erhöhen die Umwandlung von Blutzucker in Ihrem Blut in ATP (Treibstoff für Ihre Zellen) im gesamten Körper. Es wirkt synergetisch mit dem Wasserstoff.

Weitere Informationen finden Sie unter:

photon4health.de/Laser-ATP

Bei Fragen wenden

Sie sich bitte per E-Mail an:

info@hydro4health.de

