

Snelle start instructies HYDRO 4 HEALTH 1800PRO

Gefeliciteerd met de aanschaf/huur van dit waterstof-apparaat. Als u alles uit heeft gepakt beginnen we met het aansluiten van het slangetje voor de neus. U ziet een blauw buisje tussen de slang zitten. Dit is de watercollector. Die moet af en toe geleegd worden om te voorkomen dat er waterdruppels in de neus komen. Dit doet u door de 2 helften te draaien en los te trekken. Dit is pas aan de orde na een paar uur gebruik.

We sluiten nu eerst het stroomsnoer aan. De ene kant in de machine en de ander in het stopcontact. Nu zet u de machine aan met de rode stroomknop achter op de machine. De machine zegt dat het waterniveau te laag is 'low water level add water'. Omdat hij nieuw is zal hij dat nu direct aangeven. De watertank is namelijk nog helemaal leeg, die gaan we dus eerst vullen tot 5 cm onder de vulopening (de vleugel-schroefdop bovenop). Ik schat dat er +-2 liter in moet.

In de machine mag geen ongefilterd kraanwater. Er mag alleen gedemineraliseerd water (te koop bij supermarkten en bouwmarkten) zelf gemaakt omgekeerd osmose water of gedestilleerd water in. Als de tank met water gevuld is de dop er weer opschroeven en dan is het apparaat klaar voor gebruik. U kunt de waterstof productie aanzetten of pauzeren met de middelste knop op de voorkant van de machine onder het beeldscherm.

Met de linker knop kunt u eventueel de tijd aanpassen. Met de rechter knop kunt u de hoeveelheid waterstof per minuut aanpassen. Deze moet altijd op 1800 ml/min staan, de maximale hoeveelheid. Hij kan ook op 900 ml/min of 450 ml/min (milliliter per minuut). Als u minder waterstof wilt toedienen kunt u hem in mijn ogen beter gewoon op 1800 houden en de behandeltijd wat inkorten.

- De normale behandeltijd is 30 min. per keer. 3 tot 7 keer per week.
- Er is geen onderhoud nodig maar als u langer dan 2 weken het apparaat niet gebruikt is het beter geen water in de tank te laten. Dan kunt u hem het beste even op het aanrecht bij de gootsteen zetten en het schroefdopje achterop losdraaien (soms blijft het rubberkje nog zitten, die ook lostrekken). Dan zult u zien dat het water eruit loopt. S.v.p. wachten tot hij helemaal leeg is na +-10 minuten.

Optioneel

Dit apparaat werkt samen met de ATP-Polsband van PHOTON 4 HEALTH. Deze sluit u aan via de USB-uitgang op de zijkant van de machine. Deze low level lasertherapie polsband draagt u zo dat de lampjes de binnenkant van uw pols bestralen. De speciale kleuren lasers en pulsatie van het licht verhoogt de omzetting van bloedsuiker in uw bloed naar ATP (brandstof van uw cellen) in uw gehele lichaam. Het werkt synergetisch met de waterstof.

Voor meer informatie zie: photon4health.nl/atp-polsband

Als u vragen heeft e-mail naar:

info@hydro4health.nl

